



MERPLAST

## KÄYTTÖOHJE:

### Silmähuuhde, 500ml pullo

**Sisältö:** Steriili natriumliuos (NaCl 0,9%)

**Pakkauskoko:** 500 ml

**Käyttö:**

1. Avaa korkki kiertämällä jompaan kumpaan suuntaan (korkin kapseli rikkoutuu ja pullo on käyttövalmis)
2. Kumarru ja vie pullo lähelle silmää. Pidä silmä auki ja purista koko pullon sisältö silmään. Auta tarvittaessa toisella kädellä. Käytä huuhteluun molemmat pullot riittävän huuhtelun takaamiseksi. Hakeudu hoitoon.

**Huom:** Vain ulkoiseen käyttöön, ei nautittavaksi  
Älä käytä, jos neste ei ole kirkasta tai jos korkki on avattu  
Hävitä käytetty pakkaus 24h kuluessa sen avauksesta  
Säilytä lasten ulottumattomissa  
Säilytys +5-25 °C