



MERPLAST

KÄYTTÖOHJE:

Silmähuuhde, 20ml ampulli

Sisältö: Steriili natriumliuos (NaCl 0,9%)

Pakkauskoko: 20 ml

Käyttö:

1. Avaa ampullin korkki kiertämällä jompaan kumpaan suuntaan
2. Kumarru ja vie ampulli lähelle silmää. Pidä silmä auki ja purista koko ampullin sisältö silmään. Auta tarvittaessa toisella kädellä. Pyyhi silmä pehmeällä silmäpyyhkeellä.

Kemikaalivaurioissa käytä ehdottomasti isompia silmähuuhdepulloja!

Huom: Vain ulkoiseen käyttöön, ei nautittavaksi
Älä käytä, jos neste ei ole kirkasta tai jos korkki on avattu
Hävitä käytetty pakkaus 24h kuluessa sen avauksesta
Säilytä lasten ulottumattomissa
Säilytys +5-25 °C